

MASCARILLA LAVABLE CON FILTRO

Manual de uso y mantenimiento

APLICACIÓN

Este producto es de uso personal, para trabajo en industria, visita a sitios públicos y/o movilización en transporte masivo, cuyo objetivo es actuar como barrera para evitar la contaminación microbiológica emitida por la boca y la nariz.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

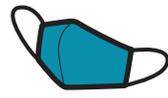
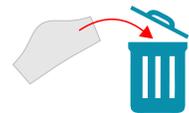
Mantener el producto sellado hasta el usuario final, lavar empaque y manos antes de abrir la bolsa. Mantener en lugar seco y fresco, alejado de agentes tóxicos o patógenos y fuentes de olor o calor.

MANTENIMIENTO

- Lavar mascarilla a diario con agua jabonosa. Preferiblemente a mano o en lavadora dentro de una bolsa de tela. Restregar suavemente la mascarilla y enjuagar hasta retirar todo el jabón. Dejar secar por completo antes de usar nuevamente.
- Se recomienda usar un filtro nuevo para cada jornada. Con esto se reduce la acumulación de humedad para hacer eficiente la protección durante todo el tiempo de uso.
- Desechar el producto cuando la tela esté rota o rasgada o los elásticos de sujeción ya no mantengan la mascarilla bien sujeta a la cara.

RECOMENDACIONES

Cada bolsa contiene dos mascarillas de diferente color, se sugiere marcarlas con marcador indeleble y usar un color diferente por día, de esa manera se motiva y se vigila el lavado diario.

MODO DE USO		
1	Lavar el empaque de las mascarillas con agua y jabón.	
2	Lavar las manos durante 40 segundos y proceder a secarlas	
3	Revisar la mascarilla y orientarla con el bolsillo hacia arriba y la tela antifluído hacia afuera.	
4	Poner la mascarilla en la cara y sujetarla al rededor de las orejas. Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta el mentón.	
5	Reemplazar la mascarilla en caso de que se humedezca.	
6	No tocar la mascarilla mientras está en uso, si se hace, hay que lavarse las manos de manera inmediata.	
7	Antes de quitarse la mascarilla, se deben lavar las manos durante 40 segundos.	
8	Tomar la mascarilla de los elásticos de sujeción.	
9	Sacar el filtro y desecharlo.	
10	Introducir mascarilla en agua-jabonosa y lavar de inmediato.	